

ISTRUZIONI



Accessori

- Apparecchio con astuccio e cinghia da collo regolabile
- Cinghia toracica e addominale regolabili (lunghe) e velcro (corto) per la fissazione al polso
- Sensore di saturazione di ossigeno con cavo di collegamento già inserito (con sensore toracico e addominale integrati)
- Sensore nasale con cavo di collegamento inserito
- Formulario di richiesta, diario del paziente e istruzioni
- Clip di chiusura rosso per la rispedizione

Rispedizione

A termine della registrazione la preghiamo di volerci rispedito l'apparecchio con cavi inseriti, cinghie, velcro, sensore toracico e addominale, sensore della saturazione di ossigeno, formulario di richiesta e diario del paziente. Le spese di spedizione sono a carico di Viollier.

- Tramite Servizio clientela – consegna allo studio medico
- Tramite DPD – consegna presso un Pickup parcelshop
→ dpgroup.com/ch/mydpg/parcel-shops
- Per posta

Per la rispedizione della valigetta voglia:

- Rimuovere l'etichetta dal campo visivo
- Far scorrere l'etichetta di restituzione appropriata (nella custodia) nel campo visivo
→ [l'indirizzo Viollier AG compare](#)
- Chiudere la valigetta con clip di chiusura rossa

Poligrafia

© by Viollier AG / 10.2023 / 14682




Herz-Lungen-Praxis | Spalenring 147 | 4055 Basel | T +41 848 121 121 | viollier.ch
Lunedì – Venerdì 07:30 – 18:00 h

Informazioni importanti

Non avviare l'apparecchio a titolo di prova. L'apparecchio non può più essere spento.

- Prima dell'esame rimuovere lo smalto e le applicazioni sulle unghie.
- Non applicare il sensore della saturazione di ossigeno alla stessa estremità alla quale è applicato il manicotto dell'apparecchio di misurazione della pressione arteriosa delle 24h, nel caso di un utilizzo contemporaneo.
- Applicare e avviare l'apparecchio prima di coricarsi.
- Durata della registrazione max. 8 ore, adatto per pazienti a partire da 20 kg.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a TAC, MRI e apparecchiature radiologiche.
- Telefoni cellulari, forti fonti elettromagnetiche e termocoperte elettriche possono influenzare la qualità della registrazione.

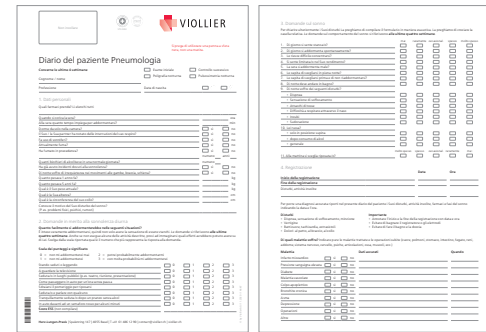

Diario del paziente


Informi il paziente sull'importanza diagnostica di compilare correttamente e completamente il diario del paziente. Si prega di utilizzare una penna a sfera nera, non una matita. Annotare l'inizio e la fine della registrazione con data e ora.

Identificazione e analisi


- Generalità del paziente
- La data da lei riportata e l'esatta ora d'inizio della registrazione
- il numero d'apparecchio e di sensore da dito indicato da Viollier nel formulario di richiesta

No. apparecchio **010** No. sensore ditale **015**

Voglia utilizzare esclusivamente l'allegato formulario di richiesta già provvisto del suo indirizzo.

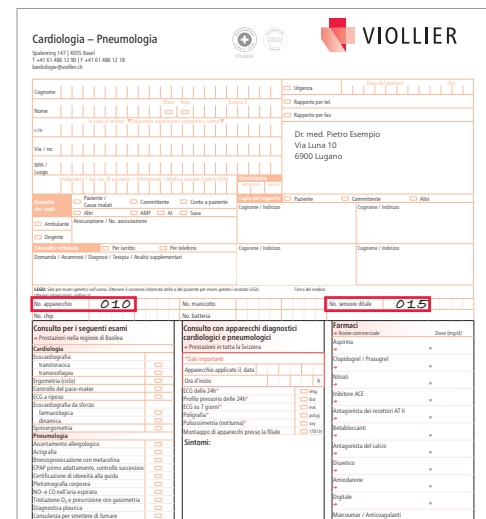


Applicazione dell'apparecchio

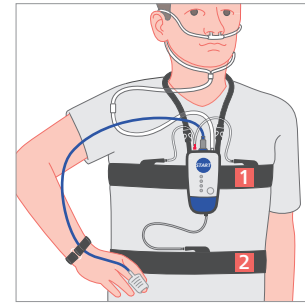




Applicare l'apparecchio prima di coricarsi

- Apparecchio, cinghia del torace e cinghia addominale non vanno indossati direttamente sulla pelle.
- Passare la cinghia da collo unitamente all'apparecchio sopra la testa.
- Con l'ausilio della **cinghia del torace 1** fissare l'apparecchio al centro all'altezza dello sterno, → **per gli uomini all'altezza dei capezzoli, per le donne sulla zona superiore del seno.**
- Fissare il sensore addominale tirando la **cinghia addominale 2** attorno all'addome (all'altezza dell'ombelico). I sensori di pressione devono trovarsi sul lato interno della cinghia. Tirare entrambe le cinghie, tuttavia non così strette da limitare la respirazione.
- Applicare il sensore nasale al di sotto del naso. Piazzare l'**apertura 3** nelle narici.
- Far passare il cavo dietro le orecchie, stringere il **dispositivo di fissaggio del cavo 4** sotto al mento e adattarlo.

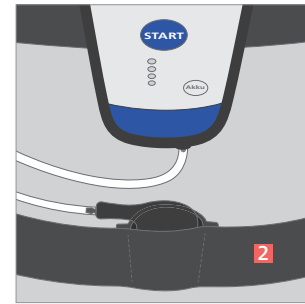

Fissare il sensore da dito

- Applicare al dito il sensore di saturazione di ossigeno con il simbolo dell'unghia verso l'alto. Infilare il sensore da dito fino a quando è visibile il polpastrello. → durante la notte è consentito spostare il sensore da un dito all'altro **5**.
- Adatti sono indice, medio, anulare (senza smalto).
- Fissare con il velcro il cavo del sensore al polso.

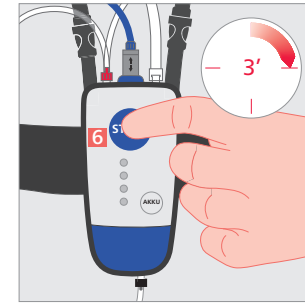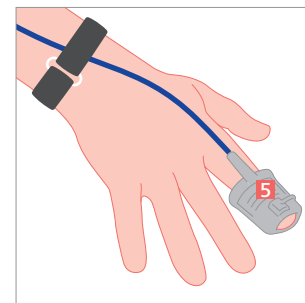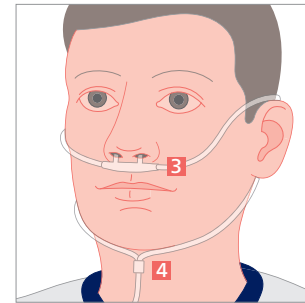

Avviare l'apparecchio

- Tenere premuto il tasto start anteriore **blu 6** per 3 secondi.
- Durante la registrazione lampeggia ogni 4 secondi la luce **verde 7**. Se accanto appare una luce **rossa 8**, il sensore del dito non è applicato correttamente. → voglia per favore correggere.
- Nel caso il sensore da dito / sensore nasale dovesse staccarsi durante la notte, si prega di applicare nuovamente.
- La mattina smontare l'apparecchio e rispedirlo. **L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 8 ore.**

