


## Abstrich – Gynäkologische Zytologie, PCR Erregernachweis: ThinPrep®

ThinPrep® Pap Test™, verschiedene Instrumente für Probenentnahme

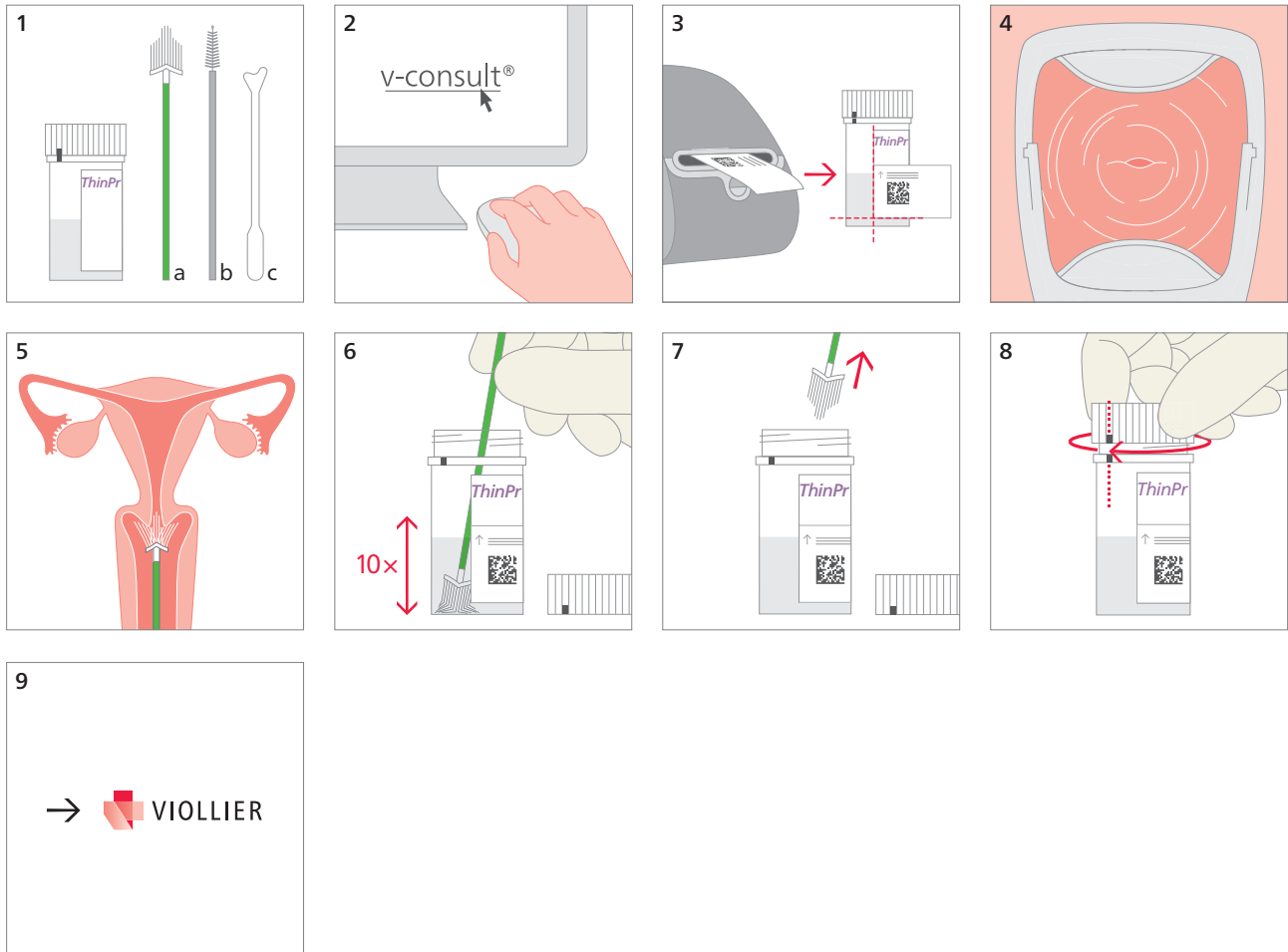

- 3 Barcode-Etikette links und unten bündig auf die bestehende Etikette kleben
- 4 Portio vaginalis uteri einstellen. Bedeckende Sekretionen schonend entfernen
- 5 Probenmaterial entnehmen:
  - a Mit **Cervex-Brush®** oder **Cervibrush® Plus**  
Leichten Druck in Richtung auf die Zervix ausüben, bis die seitlichen Borsten gegen die Ektozervix gedrückt werden  
Unter weiterhin leichtem Druck 5 x im Uhrzeigersinn drehen
  - b / c Mit **Cytobrush® Plus GT / Kunststoffspatel**  
In Zervixkanal einführen, bis nur noch die hintersten Borsten zu sehen sind  
Langsam eine ¼ oder ½ Drehung durchführen. Nicht überdrehen
- 6 Bürste in der PreservCyt-Lösung ausspülen. Dazu Bürstenkopf **10 x fest** gegen den Boden des Tubes drücken, sodass die Borsten auseinander gedrückt werden
- 7 Bürste verwerfen. **Bürstenkopf nicht im Tube belassen**
- 8 Tube fest zuschrauben bis die schwarzen Markierungen auf Verschlusskappe und Tube übereinander stehen

Gleitmittel behindern die Probenaufbereitung und erschweren oder verunmöglichen die mikroskopische Beurteilung der Zell-Ausstriche. Verzichten Sie deshalb so weit wie möglich auf deren Verwendung. Das empfohlene Gleitmittel Gyn-Lys (Art.-Nr. 600560) finden Sie im v-shop®.

Versandmaterial:

Bitte mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Patienten beschriften