


## Test respiratoire au $^{13}\text{C}$ – Helicobacter pylori

Kit test respiratoire  $^{13}\text{C}$  (56)

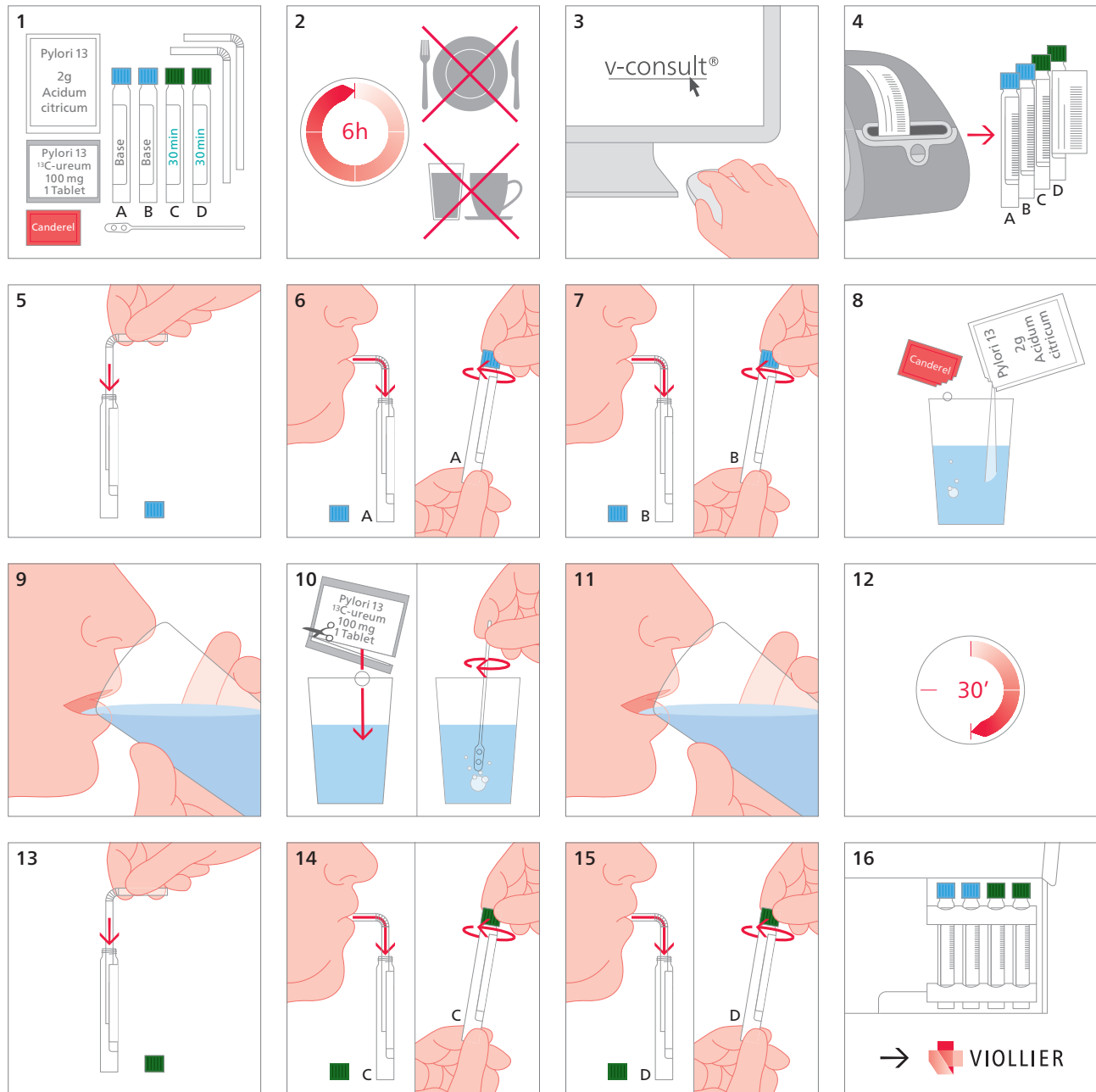

- 5 – 7 Inspirer profondément et, à l'aide de la paille, expirer lentement et **entièrement l'air (air résiduel)** dans les deux tubes avec bouchon bleu (A et B), puis refermer immédiatement les tubes
- 8 – 9 Dissoudre 2 g d'acide citrique (ainsi que les tablettes d'édulcorant si souhaité) dans 100 mL H<sub>2</sub>O et boire **tout le contenu**
- 10 – 11 Dissoudre la tablette d'urée (Urea  $^{13}\text{C}$  Tablet) dans 100 mL H<sub>2</sub>O et boire **tout le contenu**
- 12 **Attendre 30 min**
- 13 – 15 Inspirer profondément et, à l'aide de la paille expirer lentement et **entièrement l'air (air résiduel)** dans les deux tubes avec bouchon vert (C et D), puis refermer immédiatement les tubes

Matériel d'expédition :

Veuillez inscrire le nom, prénom et la date de naissance du patient