


Urine – Analyses chimiques : collecte d'urines de 24h

Flacon avec / sans conservateur (50), Tube spoturine sans conservateur (52)

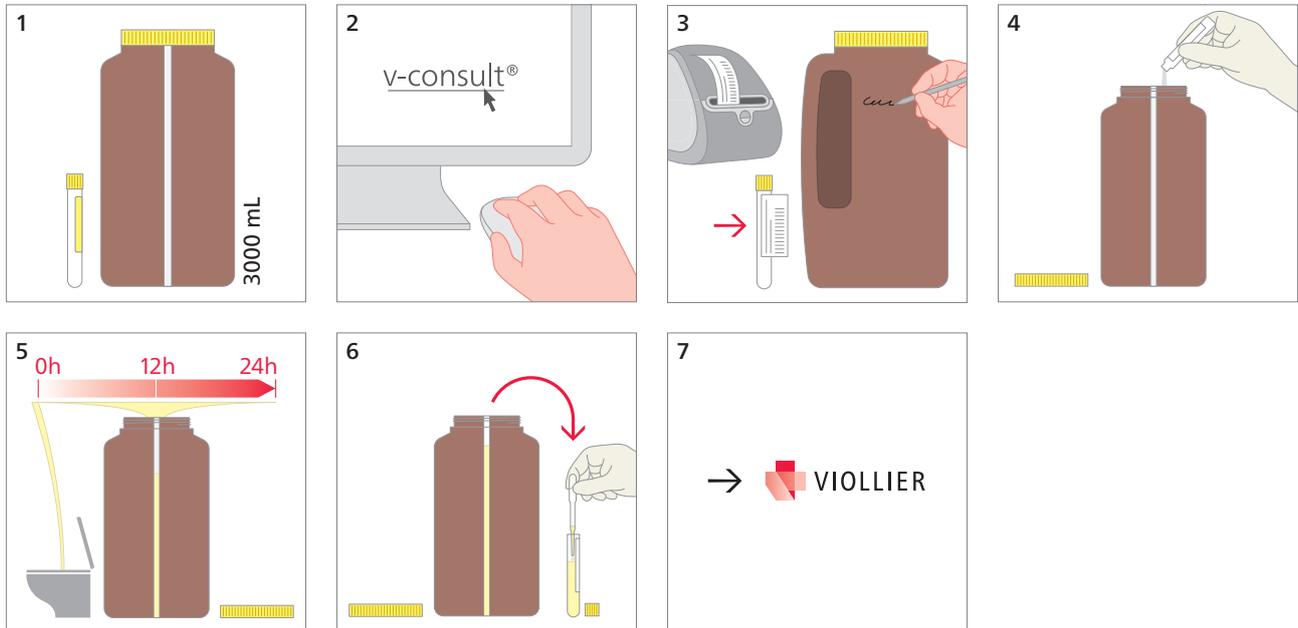

- 4 Choisir l'agent conservateur approprié selon v-consult® puis le verser dans le flacon **avant** la collecte
- 5 Début du recueil des urines : jeter les 1^{res} urines du matin et recueillir la totalité des urines suivantes jusqu'au lendemain matin, 1^{res} urines du matin incluses
- 6 Indiquer la durée et le volume de la collecte dans v-consult®
Mélanger l'urine, remplir au moins 1 tube spoturine
Respecter le volume minimal pour les analyses